

Vielen Dank für Ihren Auftrag und das uns entgegengebrachte Vertrauen! Wir hoffen, dass wir Sie mit unserer Beratung, den handwerklich hergestellten Hilfsmitteln und unserem Service rundum zufrieden stellen. Wir möchten für Sie ein kompetenter und vertraulicher Ansprechpartner sein! Sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen möchten wir Sie bitten, uns zu kontaktieren. So können wir für Ihr Anliegen zeitnah eine Lösung finden.

Gebrauchsanweisung für orthopädische Maßschuhe

- ✓ orthopädische Maßschuhe sollten eingelaufen werden. Bitte tragen Sie Ihre neuen Maßschuhe am Anfang nur stundenweise.
- ✓ Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Füße auf Druckstellen.
- ✓ Tragen Sie bitte ausschließlich Ihre orth. Maßschuhe. Auch im Haus und während der Freizeit. Bei Bedarf können Badeschuhe, Sportschuhe oder Hausschuhe, wenn vom Arzt verordnet, angefertigt werden.
- ✓ Bei ungewöhnlichen Veränderungen bzw. Schmerzen an den Füßen, vereinbaren Sie bitte zeitnah einen Termin zur Kontrolle.
- ✓ Damit die Haltbarkeit der Schuhe gegeben ist, pflegen Sie bitte Ihre Schuhe regelmäßig. Wir beraten Sie gerne über spezielle Pflege- und Reinigungsmittel.
- ✓ Ihre orth. Maßschuhe sollten aufgrund der Gewährleistung nur durch den Hersteller repariert werden.
- ✓ Sind Sie Diabetiker, beachten Sie bitte die "Gebrauchsanweisung für Diabetiker"
(auch online auf unserer Homepage zu finden).
- ✓ Bitte kommen Sie vor Ablauf der vierten Trageweche zur kostenlosen Nachkontrolle.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

Bei orthopädischen Maßschuhen ist vieles Möglich. Sprechen Sie uns gerne an, und wir versuchen Ihren Wünschen nachzukommen!

Sie sind zufrieden?

Dann bewerten Sie uns bitte online bei Facebook oder Google.

Vielen Dank!

