

Vielen Dank für Ihren Auftrag und das uns entgegengebrachte Vertrauen! Wir hoffen, dass wir Sie mit unserer Beratung, den handwerklich hergestellten Hilfsmitteln und unserem Service rundum zufrieden stellen. Wir möchten für Sie ein kompetenter und vertraulicher Ansprechpartner sein! Sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen möchten wir Sie bitten, uns zu kontaktieren. So können wir für Ihr Anliegen zeitnah eine Lösung finden.

Gebrauchsanweisung für Diabetiker

- ✓ Neue Schuhe oder neue Fußbettungen können (auch wenn nach Maß gefertigt) zunächst ungewohnt sein und ggf. auch zu Druckstellen führen. Tragen Sie daher Ihr orthopädisches Hilfsmittel in der ersten Zeit nur 15 Minuten und steigern Sie die Tragezeit kontinuierlich.
- ✓ Kommen Sie bei Einlagen und Maßschuhen in den nächsten 5 – 14 Tagen zu uns zur Kontrolle. Lassen Sie sich weitere Termine zur Nachkontrolle geben.
- ✓ Druckstellen sind für Sie extrem gefährlich! Bitte untersuchen Sie Ihre Füße täglich auf Rötungen, Druckstellen oder Verletzungen. Verwenden Sie ggf. einen Spiegel, oder lassen Sie sich von einem Angehörigen / einer Pflegeperson helfen.
- ✓ Kommen Sie sofort zu uns, falls Sie Rötungen, Druckstellen oder Verletzungen festgestellt haben, da Wundstellen und Verletzungen bei Diabetikern schlecht heilen, und zu erheblichen Komplikationen führen können.
- ✓ Bei Diabetespatienten kann das sensible Empfinden eingeschränkt sein. Achten Sie daher bitte vor jedem Anziehen auf evtl. Fremdkörper im Schuh. Vermeiden Sie bitte auch Futter- und Strumpffalten.
- ✓ Tragen Sie möglichst weiße Strümpfe, um evtl. Blut- oder Eiterspuren sofort zu erkennen. Wechseln Sie Ihre Strümpfe täglich und achten Sie darauf, dass die Strümpfe keine zu engen Bündchen haben.
- ✓ Benutzen Sie bitte täglich bestimmte Haut- und Fußpflegemittel - wir beraten Sie gerne
- ✓ Verwenden Sie keine Heizdecken oder Wärmflaschen für Ihre Füße.
- ✓ Bitte kommen Sie vor Ablauf der vierten Trageweche Ihrer diabetesadaptierten Fußbettung und nach spätestens sechs Monaten Tragezeit Ihrer Spezialschuhe zur kostenlose Nachkontrolle. Bitte vereinbaren Sie einen Termin.
- ✓ Alle Veränderungen an Ihren Füßen erfordern unbedingt die Ansicht von Ihrem Arzt.
- ✓ Dieses orthopädische Hilfsmittel wurde speziell für Sie nach Ihren Maßen gefertigt und darf daher nicht an andere Personen weitergegeben werden.
- ✓ Bei ungewöhnlichen Veränderung bzw. Schmerzen an den Füßen, vereinbaren Sie bitte zeitnah einen Termin zur Kontrolle.

Sie sind zufrieden?

Dann bewerten Sie uns bitte online bei Facebook oder Google.

Vielen Dank!

